

Jótállás és ügyintézés

Fontos számunkra, hogy hosszú távon is elégedett legyél a Lunelle talpbetéttel. A termékre a hatályos fogyasztóvédelmi előírások alapján **két év kellékszavatosság** vonatkozik, amely a vásárláskor fennálló, **rejtett anyag- vagy gyártási hibákra** terjed ki.

A kellékszavatosság kizárólag akkor érvényes, ha a talpbetétet rendeltetésszerűen használtad, megfelelően áptad és tároltad. A rendszeres viselés során fellépő **természetes elhasználódás** – például a fedőanyag kopása, elszíneződése, lábizzadás okozta foltosodás vagy az egyedi járásmód miatti alakváltozás – **nem minősül hibának**, így ezek nem tartoznak a szavatosság hatálya alá.

Ha üzletben vásároltad a talpbetétet, kérjük, az eredeti bizonylattal együtt vidd vissza abba az üzletbe, ahol a vásárlás történt.

Online rendelés esetén keresd fel azt a kereskedést, ahonnan rendelted, és juttasd vissza a terméket a megadott címre. Minden esetben vedd fel a kapcsolatot a kereskedéssel, mielőtt visszaküldenéd a csomagot.

A reklamáció során minden esetben jegyzőkönyv készül, a talpbetétet pedig szükség szerint bevizsgálásra küldik, hogy pontos képet kapjunk a probléma okáról.

Kérünk, hogy a visszaküldés előtt mindig tisztítsd meg a talpbetétet, mivel higiéniai okokból csak tiszta állapotban tudjuk átvenni és kivizsgálni.



Lunelle

Forgalmazza:
CareLux Kft.
1097. Budapest, Nádasdy utca 12. 4/414.
Adószám: 32719862-2-43
info@carelux.hu

Származási hely: Németország

Bővebb információ:
info@lunelle.hu

Partner információ:
info@carelux.hu
www.carelux.hu

Lépjünk tovább együtt:
Csatlakozz a Facebook közösségünkhöz, oszd meg a tapasztalataidat, és használd bátran a #fitlunelle hashtaget – örömmel látjuk, Te hogyan éled meg a Lunelle kényelmet.

Instagram / Facebook: @lunelle.hu
#fitlunelle
www.lunelle.hu

Érvényes: 2025.04.10-től visszavonásig



Lunelle

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

ÜDVÖZLÜNK A LUNELLE TALPBETÉT HASZNÁLÓI KÖZÖTT!

A **Lunelle** talpbetét azért készült, hogy támogassa a lábad természetes működését, és kényelmesebbé tegye a mindennapokat. A hosszanti és haránt boltozat emelése segít tehermentesíteni a lábat, enyhíteni a fájdalmakat, és hozzájárul a test egészének jobb egyensúlyához.

A **Lunelle** talpbetét Németországban készül, nagyfokú precizitással és odafigyeléssel. A gyártás alapja több mint 50 évnyi német szakértelem és technológiai fejlődés, amelyet a legkorszerűbb eljárások és kutatások egészítenek ki. A talpbetétek egyedileg fejlesztett anyagokból és különleges gyártási technológiával készülnek – olyan megoldásokkal, amelyekkel más talpbetéteknél nem találkozhatasz. Minden egyes darabot kézzel ellenőriznek és fejeznek be, hogy a végeredmény valóban megbízható, tartós és kényelmes legyen.

Ahhoz, hogy igazán jól működjön, fontos, hogy helyesen használd – ebben segít ez a rövid útmutató. Olvasd végig figyelmesen, megéri!

Hogyan Használd?

Először vedd ki a cipődből a gyári talpbetétet. Ha ez nem lehetséges (például be van ragasztva vagy varrva), győződj meg róla, hogy nincs benne boltozatemelés. A **Lunelle** talpbetétek **nem használhatók** olyan cipőkben, amelyek beépített boltozatemeléssel rendelkeznek.

Ezután nézd meg, van-e elég hely a cipődben. Mivel a talpbetét hosszanti és harántemeléssel, valamint enyhe sarokemeléssel is rendelkezik, több helyet foglal, mint egy lapos betét. Nagyon szűk cipők esetén előfordulhat, hogy kevésbé kényelmes a viselet.

Helyezd be a talpbetétet úgy, hogy a hosszanti emelés a láb belső oldala felé essen. Ügyelj rá, hogy ne gyűrődjön vagy hajoljon fel. Ha nem illeszkedik tökéletesen, vedd ki, és hasonlítsd össze a meglévő talpbetéttel. Szükség esetén a lábujjak felőli részből óvatosan vágatsz, hogy jobban passzoljon.

Lunelle

Fontos Figyelmeztetések!

A talpbetét használatát érdemes fokozatosan elkezdni. Az első napokban érdemes csupán **napi 1-2 órán át viselni**. Ezután, a következő 2-4 hét során lassan növeld a használati időt, hogy a lábad kényelmesen tudjon alkalmazkodni az új alátámasztáshoz.

Ha már korábban is tapasztaltál **boltozatsüllyedésből adódó** kellemetlenséget vagy fájdalmat, előfordulhat, hogy az első napokban a talpbetét viselése szokatlan érzést, **akár enyhe fájdalmat** is okoz. **Ez természetes reakció** – azt jelzi, hogy a talpad boltozata nem megfelelő és korrigálásra szorul a talpbetét pedig elkezdte ezt a munkát. Idősebb korban a láb lassabban alkalmazkodik, így a megszokási idő akár **4-6 hétig** is eltarthat.



Tisztítás

- 1. Mosógépben**, kímélő programon, max. 30°C-on mosható, hogy megőrizze rugalmasságát és formáját.
- 2.** Ne használj erős vegyszereket!
- 3.** Ha a talpbetét átnedvesedik, vedd ki a cipőből, és hagyd teljesen megszáradni!
- 4.** Ne tedd ki a talpbetétet közvetlen hőforrásnak – **ne szárítsd nyílt lángnál, fűtőtesten vagy hajszárítóval**, mivel a magas hőmérséklet károsíthatja az anyag szerkezetét.

A Lunelle talpbetét különlegessége, hogy a felső réteg és a különböző alkatrészek nem ragasztva vannak, hanem az alapanyag öntése folyamán kerülnek összeállításra, összepréselésre, így maximalizálva a talpbetét élettartamát, homogenitását, és ezáltal érhető el, hogy mosógépben mosás közben ne károsodjon a szerkezete.

A Talpbetét Összetétele

1. Alapanyag

MEMOPUR®, egy nagyon finom szerkezetű, nyitott cellás poliuretán hab, amelyet egyedileg, ehhez a talpbetéthez fejlesztettek ki. Kiemelkedő nyomáelosztást biztosít, rugalmas és hosszú távon is megőrzi formáját. **96%-os** helyreállító erejének köszönhetően kényelmes és **tartós** megoldás a láb számára.

2. Felső réteg

- (Lunelle Dakar Everyday, Lunelle Standard esetében): **Dakar**, ami egy egyedi fejlesztésű rugalmas mikroszálas szövet, és amelyet kifejezetten a MEMOPUR® habhoz fejlesztettek ki, biztosítva a kényelmet, tartósságot és moshatóságot.
- (Lunelle Ultra Slim esetében) **Sahara**, ami egy **antibakteriális**, tartós és kényelmes mikroszálas anyag. Úgy lett kialakítva, hogy higiénikus viseletet biztosítson, még hosszan tartó használat során is. A talp elülső részén és a sarok környékén található, nagy nyomásnak kitett zónák ki vannak könyítve, és speciálisan fejlesztett, extra puha párnázó anyag borítja őket a maximális kényelem érdekében.

